Flowable light-curing composite resin
Autor: Data de publicació: 16-12-2024
Origen
CHINA
Nombre de la marca
HEXION
name
flowable resin
size
2.5 g
Flowable light-curing composite resin
A1 2.5g,A2 2.5g,A3 2.5g,A3.5 2.5g,B1 2.5g
Descripción

Denunciar artículo
Especificación
Resina de curado por luz compuesta fluida dental
1Kit contiene 1 jeringa + 1 punta
Peso de la resina: 2,5 gramos/jeringa
Gel de Grabado: 5ml
Enlace simple: 5ml
Colores disponibles: A1,A2,A3,A3.5,B1
Almacenamiento: 15-20 ?
Característica
1. Rellenos de clase

2. Correcciones de forma y color
3. Cierre diastema
4. Restauraciones dentales de leche
5. Corrección de defectos dentales del desarrollo (e. G. Displasia de esmalte
6. Férula de dientes aflojados por trauma.
Precauciones
1. No debe usar fenoles, aceite de clavo, óxido de zinc como la primera capa del material inferior,
Porque el aceite de clavo contiene un polímero inhibidor "fenol" y afecta directamente el grado de
Polimerización de resina compuesta.
2. Tratamiento ácido para hacer un buen trabajo de protección de aislamiento de labios, dientes y dientes adyacentes
Debe evitar el contacto con los ojos, las membranas mucosas y la piel.
3. Durante la operación de curado, la distancia entre la superficie de la lámpara y el compuesto

El material debe mantenerse por debajo de 2mm, pero no en contacto con el material. Se muestra el tiempo de curad
En la mesa.
4. Antes de rellenar con adhesivo y resina compuesta, el cuerpo del diente debe ocuparse del
Contaminación superficial del agua y otras impurezas.
Almacenamiento
Uso del medio ambiente: el producto debe funcionar a temperatura ambiente
23 * C ± 2 °C condiciones ambientales.
2. Condiciones de almacenamiento: El producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco entre 10 °C
Y 25 °C, y evitar la exposición directa a la luz.
3. Vida útil: Este producto es válido por tres años, No use productos vencidos.
4. Solo para uso dental