
Flowable light-curing composite resin

Autor:

Data de publicació: 16-12-2024

Origen

CHINA

Nombre de la marca

HEXION

name

flowable resin

size

2.5 g

Flowable light-curing composite resin

A1 2.5g,A2 2.5g,A3 2.5g,A3.5 2.5g,B1 2.5g

Descripción

Especificación

Resina de curado por luz compuesta fluida dental

1Kit contiene 1 jeringa + 1 punta

Peso de la resina: 2,5 gramos/jeringa

Gel de Grabado: 5ml

Enlace simple: 5ml

Colores disponibles: A1,A2,A3,A3.5,B1

Almacenamiento: 15-20 °C

Característica

1. Rellenos de clase

2. Correcciones de forma y color

3. Cierre diastema

4. Restauraciones dentales de leche

5. Corrección de defectos dentales del desarrollo (e. G. Displasia de esmalte

6. Férula de dientes aflojados por trauma.

Precauciones

1. No debe usar fenoles, aceite de clavo, óxido de zinc como la primera capa del material inferior,

Porque el aceite de clavo contiene un polímero inhibidor "fenol" y afecta directamente el grado de

Polimerización de resina compuesta.

2. Tratamiento ácido para hacer un buen trabajo de protección de aislamiento de labios, dientes y dientes adyacentes,

Debe evitar el contacto con los ojos, las membranas mucosas y la piel.

3. Durante la operación de curado, la distancia entre la superficie de la lámpara y el compuesto

El material debe mantenerse por debajo de 2mm, pero no en contacto con el material. Se muestra el tiempo de curado

En la mesa.

4. Antes de rellenar con adhesivo y resina compuesta, el cuerpo del diente debe ocuparse del

Contaminación superficial del agua y otras impurezas.

Almacenamiento

1. Uso del medio ambiente: el producto debe funcionar a temperatura ambiente

23 * C $\pm$ 2 °C condiciones ambientales.

2. Condiciones de almacenamiento: El producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco entre 10 °C

Y 25 °C, y evitar la exposición directa a la luz.

3. Vida útil: Este producto es válido por tres años, No use productos vencidos.

4. Solo para uso dental